

ООО «Biomedical Innovation»
г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Я. Гулямова, 74
E-mail: info@uzbmi.com
Tel.: +99899 797 57 18
Tel.: +99897 714 45 54



Рекомендации по забору биоматериала на ИФА исследования

- ❖ Брать кровь для получения сыворотки надо по возможности утром, до кормления животных.
- ❖ Кровь у животных берут в пробирки с активатором свертывания (с красной или желтой крышкой).
- ❖ Объем крови:
 - от крупного рогатого скота, лошадей, овец, свиней - 7-10 мл крови;
 - от пушных зверей и птиц - 1-2 мл.
- ❖ Нужно следить, чтобы кровь стекала в пробирку струей, а не каплями, кровь, взятая каплями и вспененная, скорее гемолизируется и часто дает неправильные результаты при исследовании.
- ❖ Материал рекомендуется доставить на исследование не позднее 2-х суток при соблюдении температурного режима 2-8°C. При отсутствии такой возможности необходимо провести консервирование сыворотки крови.
- ❖ Пробирки с кровью и сыворотками плотно закрывают пробками и устанавливают для пересылки в строго вертикальном положении.
- ❖ Зимой пробирки с кровью и сыворотками упаковывают и пересылают так, чтобы они не замерзли.

Пробы направляют с сопроводительным документом

Мутные, проросшие, гемолизованные образцы исследованию не подлежат!

